

Leukosan® Adhesive

Ultrahohe Viskosität für eine präzise Wundrandadaption.

Produkt

Leukosan® Adhesive ist ein steriler, hochvisköser Hautkleber für den topischen Hautverschluss. Die ultrahohe Viskosität ermöglicht ein präzises Auftragen von Leukosan® Adhesive und reduziert das Risiko eines versehentlichen Verlaufes des Hautklebers in unerwünschte Areale. Der Hautkleber sorgt mit nur einer Klebschicht für eine schnelle und einfache Applikation und passt sich der Haut flexibel an. Für ein vielseitiges Einsatzspektrum verfügt Leukosan® Adhesive über zwei Applikator-Aufsätze: Der feine Applikator ist für einen präzisen Wundverschluss geeignet, der Schwamm-Applikator für einen breiten Schutzfilm.

Der Hautkleber polymerisiert durch die vorhandene Hautfeuchtigkeit innerhalb kurzer Zeit zu einem flexiblen Film, der die Wundränder sicher zusammenhält und die Wunde schützt. Zur leichten Dosierbarkeit wird Leukosan® Adhesive in einer Aluminiumtube mit zwei Applikatoren geliefert, die je nach Wunde entweder einzeln oder nacheinander verwendet werden können.


Leukosan® Adhesive besteht aus 2-Octyl- und n-Butyl-Cyanoacrylat-Monomeren, die zur besseren Sichtbarkeit leicht violett gefärbt sind.



Hochvisköser, steriler Hautkleber.

Anwendung

- Leukosan® Adhesive ist für den Verschluss von Schnitt- und Platzwunden sowie chirurgischen Inzisionen und minimalinvasiven Zugängen geeignet.
- Der hochvisköse Hautkleber ist ausschließlich für die topische Anwendung vorgesehen.
- Die Hautränder müssen sorgfältig adaptiert und weitgehend spannungsfrei sein. Zur Spannungsreduktion können tiefere Hautschichten und subkutanen Gewebe vor dem Einsatz von Leukosan® Adhesive mit resorbierbarem Nahtmaterial genäht werden.

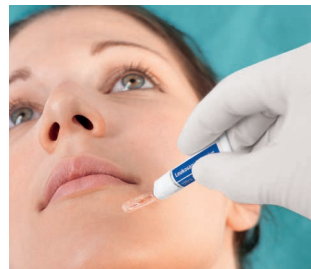

Applikation mit Schwamm-Aufsatz für einen breiten Schutzfilm.



Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Inhalt	Verp.-Einheit	PZN
1 Faltschachtel mit 10 Dosiertuben, steril			
7254100	0,70 ml	1/8	06437264
7254101	0,36 ml	1/8	08745863

CA3_62000063_01