

Sie suchen ein geeignetes Infusionsbesteck für Ihre Bedürfnisse?



Auf einen Blick die richtige Wahl: Intrafix® Infusionsbestecke von B. Braun



Infusionstherapie

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Infusionsbestecke auf einen Blick

Produkte	Typ	Art.-Nr.	PZN	Basisanforderungen						Spezialanforderungen						PVC-/DEHP-frei		
				Schutz vor dem Eindringen von Luft in die Infusionsleitung bei vollständiger Entleerung des Behälters	Einfache und sichere Entlüftung ohne Austreten von Flüssigkeit	Problemloses Umstecken in gleiche Lösungen (Mehrfachinfusionen)	Infusionsbesteck für Infusionen mit Druckmanschette (Notfall)	Problemlose Applikation der Infusion innerhalb kurzer Zeit	Problemlose Applikation 10%iger Fettlösungen bzw. Lösungen mit sehr hoher Viskosität	Problemloses Zuspitzen ohne Kanüle (ohne die Gefahr von Nadelstichverletzungen)	Arzneimittelbeständige Zuspitzen-möglichkeit für Injektionen	Erhöhte Bewegungsfreiheit	Applikation Weichmacher lösender Medikamente (z.B. Zytostatika)	Applikation lichtgeschützter Medikamente	Geignet für Parallelinfusionen			
	Standard, 180 cm	4063000	01900697				1										○	
	m. Rückschlagventil, 180 cm	4063001	03688853				1										○	
	PVC-frei (Neutrapur), 180 cm	4063002	03688913				1									●	○	
	Standard, 230 cm	4063003	05548932				1										○	
	m. nadelfreiem Y-Ventil Safeflow, 210 cm	4063004	05143477				1								3		○	
	UV-protect, orange-transparent, 180 cm	4063131	10788957													●	○	
	m. Dreiwegehahn Discifix® C, 220 cm	4063006	06934821				1								3		○	
Intrafix® Air P	Standard, 150 cm	4062955	07666297			2	1										○	
	Standard, 180 cm	4062981L	00426779			2	1										○	
	Standard, 230 cm	4060407	02559898			2	1										○	
	m. Rückschlagventil, 180 cm	4063287	00412895			2	1										○	
	m. nadelfreiem Y-Ventil Safeflow, 180 cm	4062158	05143483			2	1							3			○	
	PVC-frei (Neutrapur), 180 cm	4062191	00183182			2	1									●	○	
	UV-protect, schwarz, 230 cm	4060563	06411170			2											○	
	UV-protect, orange-transparent, m. SpinLock-Konnektor*, 180 cm	0086774R	10788963														●	○
	m. Dreiwegehahn Discifix, 195 cm	4180119	06107650			2	1							3			○	
	m. endständiger PrimeStop-Schutzkappe, 180 cm	4062982L	04187840			2	1											○
m. endständigem SpinLock-Konnektor*, 180 cm	4064007	11535129			2	1											○	

- nicht empfehlenswert
- geeignet
- gut geeignet
- nicht erfüllt

* Der SpinLock-Konnektor kann bei Bedarf wie ein Luer-Steck-Ansatz verwendet werden. Wird eine Luer-Lock-Verbindung benötigt, kann das Innengewinde des Konnektors an den Patientenzugang geschraubt werden.

- 1 Die gewohnten Sicherheitsmaßnahmen sind zu beachten
- 2 Achtung: Bei Flaschenwechsel kann Luft in das Infusionsbesteck gelangen
- 3 Bei pumpengesteuerten Parallelinfusionen muss die Schwerkraftleitung mit einem Rückschlagventil abgesichert werden

Diese Empfehlungen dienen nicht der Erteilung fachlicher Ratschläge oder Anweisungen zu den von B. Braun verkauften Produkten. Für spezielle Anfragen zu unseren Produkten nehmen Sie bitte direkt mit B. Braun Kontakt auf. Wir bemühen uns, Ihnen genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. B. Braun kann jedoch nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit diesen Informationen stehen. Deshalb übernehmen wir weder ausdrücklich oder konkludent eine Gewährleistung oder Garantie und machen keinerlei Zusicherungen im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten oder in Bezug genommenen Informationen.

● PVC-frei
○ DEHP-frei