

PreventID® CC

Vertrauen ist gut, Vorsorge ist besser

Eine zuverlässige Darmkrebsvorsorge
kann Ihr Leben retten!



PREVENTIS

Nutzen Sie Ihre Chance:

Einmal jährlich auf
„Blut im Stuhl“ testen mit dem

PreventID[®] CC

Frühzeitig erkannter Darmkrebs
ist fast immer heilbar!

Was bedeutet ein positives Ergebnis im Test?

Blut im Stuhl bedeutet nicht: Diagnose Darmkrebs!
Es können auch andere Ursachen (wie z. B. Hämorrhoiden) vorliegen.

Ist ein Okkultbluttest positiv, muss aber auf jeden Fall eine Darmspiegelung angeschlossen werden, um eine zuverlässige Diagnose stellen zu können. Im Rahmen einer solchen Darmspiegelung können gutartige Vorstufen oder Tumoren entfernt werden. Weiterhin können Entzündungen behandelt werden, so dass aus ihnen keine Krebszellen hervorgehen.

Preventis – Darmkrebsvorsorge liegt uns am Herzen

Preventis engagiert sich in den Verbänden
Stiftung Lebensblicke, Netzwerk gegen Darmkrebs und
Kompetenznetz Darmerkrankungen.



Tabuthema „Darmkrebs“

Darmkrebs ist ein Thema, das leider noch immer tabuisiert wird. Dies hat mehrere Gründe:

- Die Angst vor der Diagnose „Darmkrebs“ und das Gefühl der Ohnmacht im Falle dieser Diagnose lassen uns die Augen davor verschließen.
- Niemand redet gerne über seine Ausscheidungen.
- Der Gedanke an eine Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung verursacht Angst oder Schamgefühl.

Sie sollten sich jedoch mit diesem Thema befassen, denn die **Darmkrebsvorsorge kann Ihr Leben retten!**

Wie ist die Prognose bei Früherkennung?

26.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr an Darmkrebs. Circa 63.000 Neuerkrankungen werden pro Jahr registriert.

Dass frühzeitig erkannter Darmkrebs fast immer heilbar ist, wissen jedoch leider die wenigsten.

Wie kann Darmkrebs frühzeitig erkannt werden?

Die große Chance, Darmkrebs frühzeitig zu erkennen, ist die Untersuchung des Stuhls auf okkultes (verstecktes) Blut: Die meisten Tumoren bluten nämlich bereits im Frühstadium, auch wenn mit dem bloßen Auge kein Blut im Stuhl zu erkennen ist.

Was können Sie zur Vorsorge tun?

Lassen Sie mit dem **immunologischen Schnelltest PreventID® CC** einmal jährlich Ihren Stuhl auf okkultes Blut untersuchen!

Fragen Sie in Ihrer Arztpraxis nach diesem Test.

PreventID[®] CC

Welche Vorteile hat der Test?

PreventID[®] CC weist spezifisch ausschließlich menschliches Hämoglobin nach

Mit dem Schnelltest PreventID[®] CC gehen Sie auf Nummer sicher.


Die Vorteile dieses immunologischen Tests gegenüber herkömmlichen Okkultbluttests:

- ✓ Der Test ist hochempfindlich und weist geringste Mengen Blut nach
- ✓ Sie müssen vor dem Test keine 3-tägige Diät einhalten und Ihre Medikamente* nicht absetzen, da das den Test nicht stört
- ✓ Das Testergebnis liegt bereits nach 10 Minuten vor

*Alkohol, Aspirin und einige Medikamente rufen mitunter gastrointestinale Irritationen oder Blutungen hervor. Nehmen Sie vor der Testdurchführung Rücksprache mit Ihrem Arzt, inwieweit Sie die Einnahme derartiger Substanzen vorübergehend reduzieren sollten.

PreventID® CC

Wie wird der Test durchgeführt?

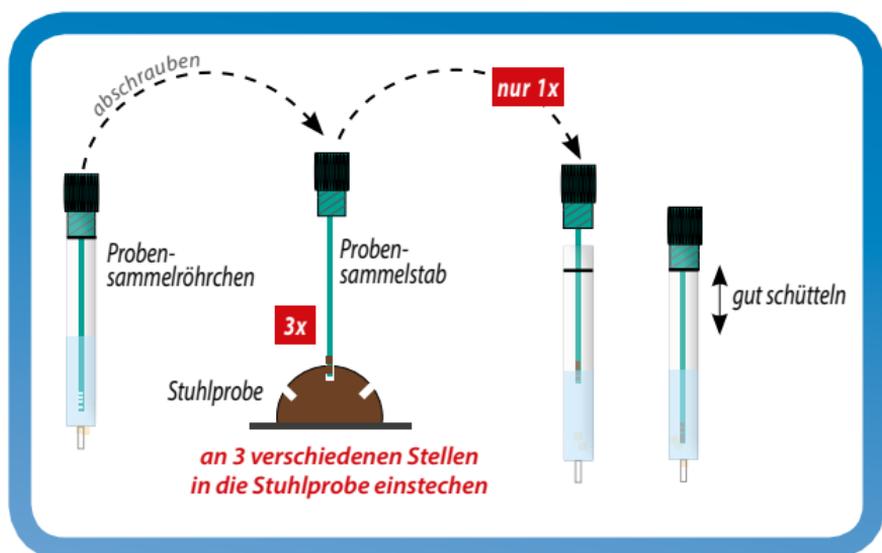

- ✓ Mithilfe von Anleitung, Papier-Stuhlfänger und Probensammelröhrchen die Stuhlprobe einfach und hygienisch gewinnen.
- ✓ Bringen Sie Ihr befülltes Probensammelröhrchen innerhalb von 3 Tagen in die Arztpraxis /zu Ihrem Betriebsarzt zurück. Bis dahin sollten Sie das Röhrchen unbedingt kühl lagern (z. B. im Kühlschrank).
- ✓ In der Praxis wird Ihre Stuhlprobe mit dem Schnelltest **PreventID® CC** auf okkultes Blut hin untersucht. Das Ergebnis liegt schon nach wenigen Minuten vor.
- ✓ Ist der Befund positiv, wird Ihr Arzt mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.
- ✓ Ist der Befund negativ, empfehlen wir für die kontinuierliche Kontrolle und Vorsorge, den Test jährlich zu wiederholen.

Überreicht durch:



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.darmkrebsvorsorge.eu



WWW.PREVENTIS.COM

Vertrieb durch:

Preventis GmbH

Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim, Germany

Fon: +49 6251 70711-0

Fax: +49 6251 70711-299

info@preventis.com