

3M™ Clipper 9681

in Verbindung mit dem 3M™ Clipper Einmalscherkopf 9680

Einzigartiges Scherkopfdesign, herausragende Leistung.

Der 3M™ Clipper Professional 9681 kombiniert ansprechendes Design mit herausragender Leistungsstärke und trägt dazu bei, das Infektionsrisiko zu reduzieren, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und die präoperative Vorbereitung für das Personal und die Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten.

Auf einen Blick

- Betriebszeit bis zu 120 Minuten
- Nur 4 Stunden Aufladezeit
- Das Design des Einmalscherkopfes 9680 verhindert, dass Haut in den Scherkopf hineingezogen wird
- Durch die Positionierung des Einmalscherkopfes “von der Haut weg” wird das Risiko von Schnitten und Hautverletzungen minimiert
- Entfernt alle Arten von Kopf- und Körperhaaren, egal ob fein oder grob, nass oder trocken
- Hilfreiche Akkuladestandsanzeige



Bestellinformationen

Katalognummer	Produktbeschreibung	Stück/ Packung	Packungen/ Versandeinheit
9680	3M™ Clipper Professional Einmalscherkopf	50	1
9681	3M™ Clipper Professional	1	1
9683	3M™ Clipper Professional Ladestation mit Kabel	1	1

Einfache Aufladung, Nutzung und Reinigung.

Scherköpfe auswechseln



Anbringen

Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Verpackung des Scherkopfes. Halten Sie den Clipper-Griff über den Scherkopf und lassen Sie ihn in Position gleiten, bis es klickt. Achten Sie darauf, dass Sie den Einmalscherkopf dabei nicht berühren!



Entfernen

Halten Sie den Scherkopf so, dass er nach unten zeigt. Drücken Sie mit dem Daumen auf den Entriegelungsknopf und entsorgen Sie den benutzten Scherkopf in einem geeigneten Behälter.

HINWEIS: Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, benutzen Sie bitte für jeden Patienten einen neuen Einmalscherkopf.

Clipping



Ziehen

Positionieren Sie den Einmalscherkopf flach oder in einem leichten Winkel auf der Haut des Patienten und ziehen Sie den Clipper vorsichtig in Ihre Richtung.

HINWEIS: Kratzen Sie nicht mit dem Einmalscherkopf über die Haut des Patienten! Bei einer nicht ordnungsgemäßen Verwendung schneidet der Clipper die Haare nicht.



Schieben

Setzen Sie den Clipper wie einen Stift mit dem Einmalscherkopf flach oder in einem leichten Winkel auf der Haut des Patienten auf. Schieben Sie den Clipper vorsichtig entgegen der Haarwuchsrichtung des Patienten vorwärts.

HINWEIS: Wenden Sie niemals übermäßigen Druck an, wenn Sie den Clipper auf der Haut des Patienten entlang schieben!

Reinigungsmöglichkeiten

Eintauchen

Wenn der Clipper ausgeschaltet und der Einmalscherkopf entfernt ist, tauchen Sie den Clipper in eine geeignete Desinfektionslösung ein. Trocknen Sie den Clipper sorgfältig bevor Sie ihn neu aufladen oder erneut verwenden.

HINWEIS: Tauchen Sie den Clipper nicht tiefer als 15 cm oder länger als 15 Minuten in Wasser oder eine andere Lösung ein.



Abspülen

Spülen Sie das Handstück – nachdem Sie den Clipper ausgeschaltet und den Scherkopf entfernt haben – unter fließend, warmem Wasser ab. Trocknen Sie den Clipper sorgfältig, bevor Sie ihn neu aufladen oder erneut verwenden.



Abwischen

Wischen Sie den Clipper-Griff – wenn der Clipper ausgeschaltet und der Einmalscherkopf entfernt ist – mit einem geeigneten Desinfektionstuch ab.

Aufladen



Vor dem erstmaligen Gebrauch muss der Clipper drei Stunden aufgeladen werden. Stellen Sie das Handstück nach jeder Verwendung in die an den Strom angeschlossene Ladestation. Der Clipper kann bei einer Ladezeit von 4 Stunden 120 Minuten lang ohne Kabel verwendet werden.

Wenn der Clipper vollständig aufgeladen ist, leuchten die oberen drei LED-Anzeigen grün und die unteren beiden gelb. Wenn der Akku aufgeladen werden muss, blinkt die unterste LED-Lampe auf. Während des Aufladens blinken die LED-Lampen auf. Der Ladestatus lässt sich anhand der zum jeweiligen Zeitpunkt aufblinkenden Lampe feststellen.

Für weitere Informationen zu 3M™ Chirurgischen Clippern und anderen Solventum Produkten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Solventum Medizinprodukteberater oder besuchen Sie uns auf [solventum.com/de-de/home/medical/](https://www.solventum.com/de-de/home/medical/)



Solventum Medical Surgical
MedSurg-AT@solventum.com
MedSurg-CH@solventum.com
MedSurg-GE@solventum.com

© Solventum 2025. Solventum und das S Logo sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von Solventum oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. 162002